

ООО «Медтехника МОСКВА»

<http://www.med-mos.ru>

e-mail: info@med-mos.ru

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10

ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,

Расчетный счет № 40702810400000012277 В ОАО "Промсвязьбанк" БИК 044525555 Корсчет: 30101810400000000555

Юридический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

Фактический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

ОКПО 88320818 ОКВЭД 51.46

Паспорт изделия

(руководство по эксплуатации)

Производитель: GUANGZHOU CITY GOLDRELAX CO., LTD
CHANGSHA ROAD, NO.20, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, CHINA

Подогреватели для массажных камней (модель на 6 литров и на 18 литров)
Артикул: 18 QR Артикул: 6 QR

Модельный ряд: НГ-18QR

Модельный ряд: НГ-6QR

Номер партии: 012020080201-4/20



Массаж камнями это уникальная терапевтическая процедура, которая, при правильном использовании, может принести незамедлительный лечебный эффект. Как и при проведении любой терапии, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред пациенту. Перед использованием нагревателя для камней настоятельно рекомендуем проконсультироваться у квалифицированного специалиста в области стоун-терапии.

ВНИМАНИЕ! При использовании нагревателей для камней, как и любого другого электрического устройства, необходимо соблюдать базовые правила безопасности работы с электроприборами:

Устройство комплектуется коротким шнуром электропитания с целью предотвращения запутывания или падений.

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками или прихватками
3. Во избежание поражения электрическим током, не подвергайте кабель, вилку или сам прибор воздействию воды или других жидкостей.
4. Перед тем, как вытащить шнур питания из розетки, отключите температурный режим на нагревателе.
5. Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.

ООО «Медтехника МОСКВА»

<http://www.med-mos.ru>

e-mail: info@med-mos.ru

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10

ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,

Расчетный счет № 40702810400000012277 В ОАО "Промсвязьбанк" БИК 044525555 Корсчет: 30101810400000000555

Юридический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

Фактический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

ОКПО 88320818 ОКВЭД 51.46

6. При использовании устройства в непосредственной близости от детей, необходимо соблюдать контроль над ними.
7. Отключайте нагреватель от сети, когда устройство не используется или перед очисткой. Перед снятием деталей или очисткой позвольте нагревательным элементам остыть.
8. Запрещается пользоваться электроприбором с поврежденным кабелем питания. Для ремонта, электрических или механических регулировок, обращайтесь в сервисном центре.
9. Использование аксессуаров или приспособлений, которые не были рекомендованы производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
10. Не используйте вне помещений.
11. Не перегибайте электрический провод столом или тяжелыми предметами и не допускайте контакта провода с нагревательными элементами.
12. Не помещайте устройство на газовую или электрическую плиту или рядом.
13. Будьте предельно осторожны при переносе с горячей жидкостью внутри.
14. Используйте прибор только по назначению и теми способами, которые описаны в инструкции.
15. Не заполняйте емкость водой более, чем на 1 дюйм (2,5 см) до края резервуара. Устанавливайте прибор на ровную поверхность.
16. Всегда сначала кладите в резервуар с водой камни, а потом добавляйте воду.
17. Не используйте терапию при наличии сыпи, ожогов, порезов или иных раздражениях или повреждениях кожи, также если у вас чувствительная кожа.
18. Никогда не ставьте прибор, подключенный к электросети, в ванну или раковину.
ЭЛЕКТРООПАСНО!
19. Всегда проверяйте температуру каждого камня сначала пальцами, а затем, взяв его в ладонь, прежде чем приложить их к человеку.
20. Используйте термостойкие перчатки или деревянную ложку, чтобы извлекать камни из нагревателя без риска получения ожогов.
21. Никогда не добавляйте кипящую воду во избежание ожогов и ошпаривания.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ: Устройство комплектуется коротким шнуром электропитания с целью предотвращения запутывания или падений.

Перед первым использованием нагревателя

1. Распакуйте устройство полностью и **ИЗВЛЕКИТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ, ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ.** Установите нагреватель **В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ НА ЖАРОПРОЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.**

ООО «Медтехника МОСКВА»

<http://www.med-mos.ru>

e-mail: info@med-mos.ru

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10

ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,

Расчетный счет № 40702810400000012277 В ОАО "Промсвязьбанк" БИК 044525555 Корсчет: 30101810400000000555

Юридический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

Фактический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

ОКПО 88320818 ОКВЭД 51.46

2. Убедитесь, что ваш нагреватель соответствует стандартам электропитания, это указано на наклейке на дне устройства. Если условия не соответствуют заявленным, пожалуйста, не используйте устройство и незамедлительно вызовите специалистов!
3. Вставьте вилку в розетку 220 вольт.
4. Поверните ручку регулятора температуры в режим «Нагрев» до максимального значения и позвольте устройству поработать в течении 60 минут, пока не исчезнут запахи прокаливания или дыма.
5. Если останется небольшой запах дыма или прокаливания, не переживайте, они исчезнут при обычном использовании устройства.
6. После окончания процедуры прокаливания поверните ручку регулятора температуры полностью против часовой стрелки, отключите нагреватель от электросети и дайте устройству остыть.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вымойте все массажные камни перед использованием.
2. Положите полотенце для рук на дно резервуара для воды нагревателя. Разместите все камни на полотенце.
3. Перед включением нагревателя в сеть убедитесь, что в емкости достаточно воды, она должна полностью покрывать камни или заполните до максимально возможного уровня, но от верхнего края емкости до уровня воды должно быть не меньше 1 дюйма (2,5 см). Поверните ручку регулятора температуры полностью против часовой стрелки до отметки Place Cover на устройстве.
4. Подключите кабель в розетку (120/230 вольт). Выберите температурный режим «Нагрев» и подождите 20-30 минут, пока вода нагреется. Когда вода достигнет требуемой температуры, поместите ручку регулятора на панели управления в режим «Рабочий диапазон» для поддержания нужной температуры.
5. Используйте точный термометр для измерения температуры воды в резервуаре, необходимой для того, чтобы камни не потеряли своих терапевтических свойств, если вы не уверены.
6. Только для модели на 18 литров: Индикатор нагрева может периодически загораться и гаснуть с нагревательным элементом. Когда индикатор горит, идет нагрев.
7. Осторожно извлеките первый камень из емкости нагревателя. Проверьте его температуру касанием пальца, затем возьмите его в руку. Температура камня должна быть достаточно теплой, но не причинять дискомфорта.
8. После окончания процедуры поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки до режима выключения. Всегда отключайте устройство от электросети, когда оно не используется.
9. Никогда не бросайте камни в емкость. Это может повредить нагреватель. Извлекать и заменять камни нужно аккуратно.
10. Никогда не прикладывайте горячие камни к уже обработанным участкам тела.

ООО «Медтехника МОСКВА»

<http://www.med-mos.ru>

e-mail: info@med-mos.ru

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10

ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,

Расчетный счет № 40702810400000012277 В ОАО "Промсвязьбанк" БИК 044525555 Корсчет: 30101810400000000555

Юридический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

Фактический адрес: 125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х

ОКПО 88320818 ОКВЭД 51.46

Обслуживание и очистка.

1. Очищайте нагреватель после каждого применения.
2. Установите минимальное значение температуры и отключите устройство от электросети перед очисткой.
3. Позвольте нагревателю остыть до комнатной температуры перед очисткой или снятием частей.
4. Сначала осторожно извлеките камни, а затем емкость для воды.
5. Вымойте емкость для воды и крышку в теплой воде с мылом, затем ополосните чистой водой и протрите насухо полотенцем.
6. Протрите нагревательный элемент с помощью влажной тряпки. Будьте очень осторожны при очистке нагревательного элемента. НИКОГДА не погружайте нагреватель в воду и не ставьте в раковину для ополаскивания.
7. Ополосните камни теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Ополосните камни теплой чистой водой и дайте им высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

Гарантия

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** со дня продажи; исключение составляют быстроизнашивающиеся детали и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Печать, подпись продавца: